

INVAPALVELU OY

0400-686 801

invapalvelu@gmail.com

www.invapalvelu.fi

CARONY SIIRTOTUOLI

SIIRTOTUOLI, JONKA ANSIOSTA SIIRTYMINEN AUTOON ON HELPPOA JA VAIVATONTA



1. Kevyt liikutella ja kääntää pienessä tilassa.



2. Käännä kääntölevy ulos.




3. Irrota työntökahva ja jalkatuet ja telakoi tuoli ulos kääntölevyn kääntölevyyn.



4. Irrota siirtotuolin turvalukko ja työnnä tuoli asiakkaineen autoon.



5. Käännä tuoli oikeaan asentoon auton sisällä. Varmista, että kääntö- ja lukko lukittuu ja kiinnitä turvavyö.

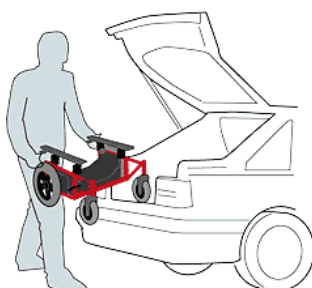

6. Laita siirtotuolin runko tavaratilaan ja varmista, että se on hyvin kiinnitetty.



Istuin on ergonomisesti muotoiltu tyylikäs erikoisistuin.



Istuinta voidaan käyttää pelkästään kääntöistuimena.



CARONY perusvarustukseen kuuluu:

- BEVIN muotoiltu erikoisistuin.
- käännettävät käsinojat ja päätuki.
- ergonomiset työntökahvat.
- säädettävät / irrotettavat jalkatuet.
- korkeussäädettävä (20 cm) tuolin runko.
- kestävä ilmakumirenkaat.

CARONY toimii myös pyörätuolina, tuolia on kevyt työntää ja kynnyksen ylitys on vaivatonta keveän kallistuksen ansiosta.

INVAPALVELU OY

Inva-autoilun asiantuntija

Markku Laulumaa 0400-686 801

Makasiinikatu 9 A 4, 90130 Oulu

invapalvelu@gmail.com

www.invapalvelu.fi

Valmistaja

 BraunAbility